


Der IVD Wurmtest - Tipps für Probennahme & Versand von Kotproben für die parasitologische Untersuchung

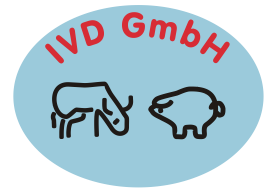

Probennahme Pferd

Mindestmenge Kot pro Tier: mind. 10 g (Gramm) oder 1 „Pferdekotapfel“

Sammelkotprobe von einem Pferd zur Wurmkontrolle:

- an bis zu 3 aufeinanderfolgenden Tagen je einen „Pferdekotapfel“ in dem umweltfreundlichen kompostierbaren Kotsammelbeutel sammeln.
- Die Proben müssen bis zum Versand bei 4 - 8°C gelagert werden.
- Die 3 Kotsammelbeutel dann in eine zusätzliche Plastiktüte geben, verschließen und mit ausgefülltem Untersuchungsanforderungsformular einsenden


Sammelproben von maximal 5 Tieren:

- möglichst nach Altersgruppen trennen wegen des unterschiedlichen Verwurmrungsrisikos, d.h. Fohlen, Jährlinge, Zuchtstuten, ≥ 5 jährige Pferde

Vorzugsweise frischen oder vom Boden aufgenommenen Kot (nicht älter als 2 Stunden) versenden. Bei täglichem Ausmisten ggf. auch über Nacht ausgeschiedener Kot verwendbar.

Vorsicht: bei „älteren“ Kotproben Reduktion der Wurmeier durch Larvenentwicklung, besonders bei wärmeren Außentemperaturen.

Kotproben aufsammeln, indem man den strapazierfähigen, kompostierbaren Kotbeutel (alternativ: Gefrierbeutel) als „Handschuh“ verwendet und über den „Haufen“ stülpt und auslaufsicher verschließt (fester Knoten oder Clip).

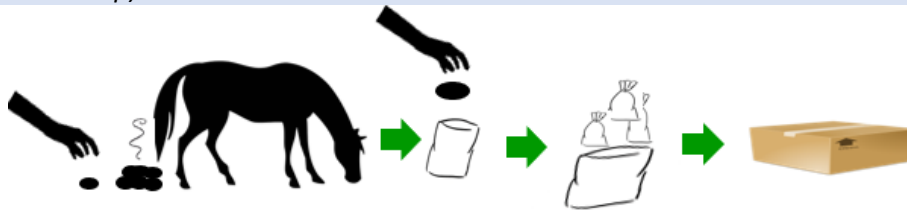

Regeln für den Versand von klinischen Proben (ADR Vorschrift P650 für den Postversand)

- Umverpackung: geeigneter Versandkarton
- Doppelte Verpackung:
Erstverpackung ist ein kompostierbarer Kotsammelbeutel
Auslaufsichere **Zweitverpackung** (Plastiktüte mit Saugeinlage)
- Kennzeichnung: mindestens als FREIGESTELLTE VETERINÄRMEDIZINISCHE PROBE oder als BIOLOGISCHE SUBSTANZ KATEGORIE B **UN3373**



Hinweise zu den Kotproben:

- *Kotproben möglichst am selben Tag (montags bis donnerstags) verschicken, so dass sie am darauffolgenden Tag im Untersuchungslabor eintreffen.*
- *Falls die Versendung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist, Proben bei 4-8°C (im Kühlschrank) lagern.*
- *Die Kotsammelbeutel in eine verschließbare Zweitverpackung (Plastiktüte) geben,*
- *mit ausgefülltem Untersuchungsanforderungsformular und*
- *bei wärmeren Außentemperaturen mit Kühlakku als Päckchen/Paket verschicken.*

Komplette Sets für die Probennahme und den Versand können Sie auch bei uns erwerben.

Weitere Informationen zum Probenversand und zur Bestellung der Wurmsets finden Sie auch auf unserer Internetseite: <https://www.ivd-gmbh.de/probennahme-und-versand> unter dem Stichwort Versandmaterial

IVD GmbH
Albert-Einstein-Str. 5
30926 Seelze

Tel: 0511 220029-0
Fax: 0511-220029-99
service@ivd-gmbh.de